


1

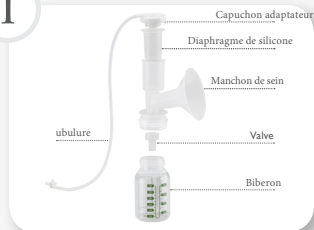


Assembler l'ensemble de collecte de lait

2



Insérer le connecteur double dans le piston

3

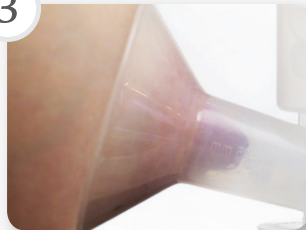


Ajuster le manchon au centre du mamelon pour créer un sceau étanche

4



Pour démarrer, tourner le bouton « VACUUM » vers la droite au niveau de confort le plus élevé. Commencer à mi-chemin et ajuster au besoin

5

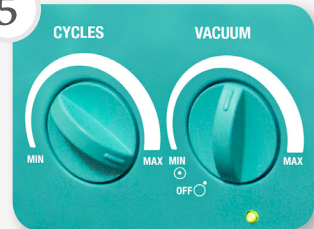

Tourner le bouton « CYCLES » vers la droite, au maximum

6




Dès que la montée de lait se produit, tourner le bouton « CYCLES » vers la gauche afin de faciliter l'écoulement du lait. Essayer à mi-chemin et ajuster au besoin

7



Si le débit de lait diminue, essayer une autre descente de lait en tournant le « CYCLES » au maximum, puis vers la gauche quand le lait s'écoule de nouveau. Répéter au besoin

8

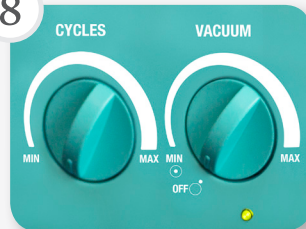

Pour arrêter l'appareil, tourner le bouton « VACUUM » complètement à gauche